

КАТАЛКА МЕДИЧНА TRANSCARE



Каталка медична TRANSCARE - застосовується для розміщення та транспортування пацієнтів при наданні невідкладної медичної допомоги, обстеженні та догляду



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Виріб складається з основи, до якої кріпляться колеса; системи регуляції висоти; металевого каркаса з платформою товщиною 6 мм, металевих знімних поручнів та матрацу. Сталеві частини каталки медичної покриті епоксидним покриттям

Каталка оснащена гідравлічною системою регулювання висоти.



1. Підйомник ліжка в положення сидячи
2. Бічні поручні, що складаються вздовж каталки
3. Опори з функцією регулювання висоти та положенням Тренделенбурга
4. Центральна гальмівна система
5. Двосторонній важіль (педаль) для регулювання висоти рами
6. Двосторонні важелі (педалі) для регулювання положення Тренделенбурга / АнтиТренделенбурга
7. П'яте колесо
8. Поворотні колеса Ø 200 мм
9. 4 захисні бампери
10. Ручка для транспортування
11. Штатив для крапельниці

ОСОБЛИВОСТІ

ПЛАТФОРМА

- Конструкція із сталевій рами з епоксидним покриттям
- 2-секційна матрацна платформа з HPL (ламінату високого тиску), матеріалу стійкого до вологості та ударів
- Повністю рентгенпрозора платформа. Корисна поверхня 100%
- 4 регульовані та рухомі гачки для сечоприймачів та інших аксесуарів, розміщених з обох боків каталки

ФУНКЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

- Пневматичне регулювання секції спини за допомогою 2-х газових пружин, кожна на 200 NW
- Гідравлічне регулювання висоти від 515 мм до 820 мм за допомогою двох колон, які захищені пластиковими циліндрами, що дозволить краще очищати та дезінфікувати.
- Гідравлічне регулювання положень Тренделенбург та АнтиТренделенбург ($\pm 16^\circ$)
- Ножні педалі з обох боків для регулювання висоти опорної платформи, Тренделенбурга та АнтиТренделенбурга.

Гідравлічна підйомна система:

(a) Щоб підняти каталку, натисніть на педаль збоку декілька разів, доки каталка не підніметься на потрібну висоту.

(b) Щоб опустити каталку, потягніть обидві педалі Тренделенбурга/Антитренделенбурга одночасно, поки не досягнете бажаної висоти

A:



B:



Система гальмування:

(a) щоб зафіксувати каталку в нерухомому положенні, слід натиснути на педаль.

(b) щоб повернути каталку до рухомого стану, слід підняти педаль вгору.




Встановлення положення Тренделенбурга/ АнтиТренделенбурга за допомогою гідравлічної опори:

(a) Натисніть педаль **a**, щоб досягти положення Тренделенбурга.

(b) Натисніть педаль **b**, щоб досягти бажаного положення АнтиТренделенбурга.


Щоб повернутися у вихідне положення, слід потягнути важіль назад.

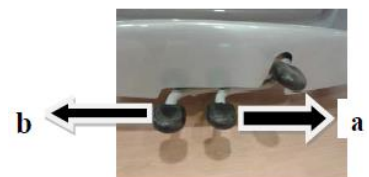

Регулювання положення секції спини:


(a) щоб змінити положення секції спини у вертикальне положення, слід потягнути вгору важіль, розташований під нею.

(b) щоб повернути секцію спини в горизонтальне положення, потрібно натиснути на той самий важіль так само, як і раніше, але цього разу притискаючи секцію спини вниз.

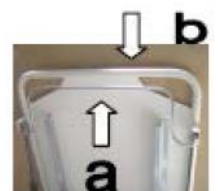


Бічні поручні, що складаються:

Щоб поставити бічні поручні в робоче положення (a), потягніть вгору та утримуйте чорний важіль, розміщений з кожного боку каталки, (b), одночасно з цим візьміть верхню частину

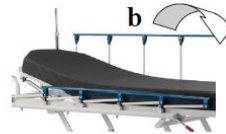

бічної поручні і переведіть її в горизонтальне положення

- Центральна система гальм з системою регулювання, що полегшує транспортування та переміщення ліжка однією людиною та запобігає можливим травмам медичного персоналу. Важіль управління гальмом розташований у нижній частині ліжка. Наклейка допомагає вибрати різні положення (3 рівня):

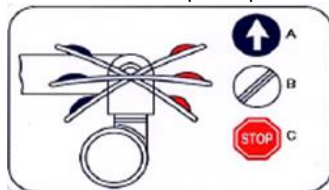

А – Рульовий механізм: поставте ногу на ліву або внутрішню сторону важеля (зеленого кольору) і натисніть його вниз, поки він не залишиться зафіксованим у новому



положенні. Одне з передніх коліс, тобто ті, що знаходяться ближче до узголів'я, залишається закріпленим у поздовжньому напрямку ліжка для легшого переміщення, штовхайте каталку зі сторони ніг. Функція рульового керування активована.

В – Нейтральне положення: щоб перевести важіль у нейтральне горизонтальне положення, натисніть відповідну його сторону, ліву (зелена) або праву (червону). Таким чином, кожне колесо рухається вільно, що дозволяє переміщати каталку в усіх напрямках.

С – Центральна гальмівна система: поставте ногу на праву або зовнішню сторону важеля (червоного кольору) і натисніть його вниз, поки він не залишиться зафіксованим у новому положенні. Усі чотири колеса залишаються нерухомими, і каталка готова до використання в лікарні.

- 4 антистатичні колеса діаметром 200 мм і додаткове 5-те колесо для покращення маневреності каталки (для поворотів потрібно менше місця).
- Ручки, що складаються, на кульковому шарнірі, який повертається на 180°, та кріплення з якісної нержавіючої сталі ISI304



Складні ручки для зручного транспортування



Знімна підніжка з ручками



Тримач для кисневих балонів

КОМФОРТ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ТА ТРАНСПОРТУВАННІ ПАЦІЄНТА

- бічні поручні-обмежувачі, що складаються вздовж каталки, виготовлені з алюмінію, легкі, міцні та стійкі до корозії. Легке та безпечне регулювання, що дозволяє уникненню затиснення та травмування. Їх положення в зібраному стані не перевищує висоту матрацу, що сприяє комфортному, безпечному і плавному перенесенню пацієнта. Загальна довжина бічних поручнів 150 см, висота 34 см, відстань між вертикальними перетинками 29 см
- в'язкоеластичний матрац з пінополіуретану високої щільності, висота 10 см для оптимального комфорту та ергономіки. Покриття антибактеріальне, стійке до стирання, водостійке, вогнестійке, повітропроникне, придатне для обробки дезінфікуючими засобами. Легке очищення та обслуговування
- кріплення для телескопічного штатива для інфузій на кожному куті (регулювання висоти в 3-х позиціях, максимальна висота 1050 мм)
- гумові бампери на кожному куті, що забезпечують захист від ударів по всьому периметру
- нижня панель з термопластичного ABS пластику легко очищається, має широкий вбудований тримач для кисневих балонів

МАТРАЦ



Пінополіуретан високої щільності. Підходить для постійного використання. Висока адаптивність до форми тіла

- Повітропроникний. Розміри: 68 x 190 см
- В'язкопружний матрац (Visco). Він включає в себе 8 см пінополіуретану високої щільності плюс 2 см в'язкої піни 50 щільності



Водостійкий



Повітро-
проникний



Антибактеріальний,
протигрибковий



Вогнестійкий
Норма
BS7175



Легке
очищення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішні розміри каталки: 2110 x 880 мм
 Ложе пацієнта: 1890 x 680 мм
 Регулювання висоти стандартне: 515 – 820 мм
 Регулювання висоти при наявності тримача для рентгенкасети: 570 – 880 мм
 Кут нахилу секції спини: 90°
 Розмір секції спини: 620 x 710 мм
 Розмір секції ніг: 660 x 1160 мм
 Тренделенбург / антиТренделенбург: ±16°
 Максимальне безпечне навантаження: 317 кг
 Вага без аксесуарів: 100 кг

Аксесуари в стандартній комплектації: матрац , штатив для інфузій, 5-е колесо